

Wien gurgelt: So funktioniert's

Anleitung Schritt für Schritt

17.02.2021, 13:16



© WKW/BOCK

1. Aktivierung

Testperson meldet sich via Computer oder Smartphone zum Test an - auf der Website lead-horizon.org und gibt dort die persönlichen Daten ein.

2. Identitätsnachweis

Mit der Computer- oder Handy-Kamera nimmt die Testperson ein Foto von sich und einem amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass) auf.

3. Spülen

Jetzt nimmt die Testperson die Salzlösung (A) in den Mund und spült eine Minute lang vor laufender Kamera. Gurgeln ist nicht notwendig - es reicht, wenn der Mundraum gründlich mit der Flüssigkeit gespült wird. Am Bildschirm läuft ein Countdown. Anschließend kommt die Flüssigkeit durch das Transferröhrchen (B) in das Probenröhrchen (C). Danach hält die Testperson das verschlossene Probenröhrchen mit der Probennummer gut lesbar in die Kamera.

4. Versand

Das Probenröhrchen wird nun zuerst im Schutzbeutel (D) und dann in der Testkit-Box (E) verpackt und zeitnah entweder im Unternehmen oder in einer nahegelegenen Bipa-Filiale abgeben. Von dort gehen die Proben ans Labor.

5. Ergebnis


Das Testergebnis langt innerhalb von 24 Stunden ab Abgabe des Tests via E-Mail bei der Testperson ein.

Berichte



© FLORIAN WIESER

Das könnte Sie auch interessieren

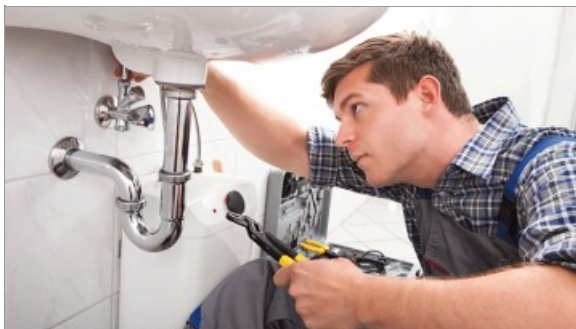

Parkkleber für einzelne Branchen

Ob Handwerksbetrieb, Kfz- Händler oder -werkstätte oder Hotels: Eigene Parkkleber machen diesen Branchen das Parken in Wien leichter [➤ mehr](#)



Checkliste zur E-Zustellung

Unternehmen sind verpflichtet, an der elektronischen Zustellung teilzunehmen. Die wichtigsten Infos im Überblick. [➤ mehr](#)



Vorsorgen vor der nächsten Welle

Was Unternehmen jetzt tun können [➤ mehr](#)